

HEMOFAST®



Lecteur portable du taux d'hémoglobine.

FIABLE

- ◆ Système qualité certifié **ISO 9001** et **ISO 13485**.
- ◆ **Marquage CE**: certificat fourni.
- ◆ Corrélation: **96%** avec l'automate ADVIA de Bayer.
(Evaluation Novembre 2004 - Laboratoire biochimie générale et spécialisée, Hôpitaux universitaires de Strasbourg).

PERFORMANT

- ◆ Lecture sur **écran digital**.
- ◆ Système de guidage sur écran facilité par des icônes conviviaux.
- ◆ Mémoire le dernier résultat obtenu.

PRATIQUE

- ◆ Avec **une seule goutte de sang capillaire**, le système HEMOFAS® fournit une analyse précise du taux d'hémoglobine **en moins de 1 minute**.
- ◆ **3 étapes** suffisent.

SIMPLE ET RAPIDE

- ◆ Réalisable par des professionnels de santé non spécialisés.
- ◆ Ne nécessite **pas d'entretien**.
- ◆ Portable: fonctionne **avec piles**.




HEMOFAST®

MODE OPÉRATOIRE



1 Insérer la carte test.

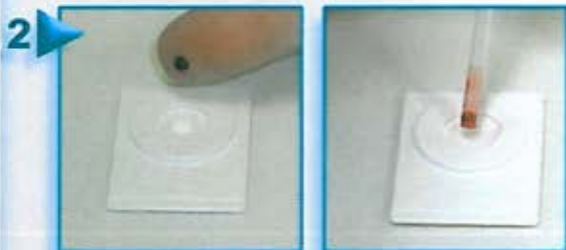

2 Appliquer l'échantillon.
Environ 12 µL de sang capillaire.



3 Résultat en quelques secondes.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTERISTIQUES HEMOFAST®	
Méthodologie	Réflexométrie
Principe	Azidéméthémoglobine
Calibration	Automatique (code-clé)
Type d'échantillon	Sanguin
Taille de l'échantillon	1 goutte (environ 12 µL)
Linéarité	6 à 21 g/dL
Précision intra essais	3,5% à 4,9%
Précision globale	2,9% à 4,2%

RÉFÉRENCES DISPONIBLES

REF.	ARTICLE
5000	Coffret de 100 cartes tests HEMOFAST (4 sachets de 25) et carte CODE
8000	Lecteur HEMOFAST STAT-Site (pile et guide d'utilisation inclus)
8001	5 piles 3 Volt Li (CR 2032)
7000	Tubes de transfert de 12 µL (100 tubes/sachet)
5001	Contrôles HEMOFAST (6 x 1,5 mL - 3 niveaux haut et 3 niveaux bas)

CE



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

